



Umbrella™

TONGUE, LIP, & CHEEK RETRACTOR

UP
ULTRADENT
PRODUCTS, INC.

NEW!

¡Práctico acceso,
Eficiente Aislamiento y

Máximo Confort!



Práctico acceso para todos los Procedimientos

El retractor de lengua, labios y mejillas Umbrella™ es el nuevo estándar tanto en la comodidad del paciente como en el fácil y estable acceso para el profesional.



Mejor visibilidad



Control de mordida



Registro de mordida



Adhesión directa de brackets de ortodoncia



Impresión de doble arcada



Impresión de arcada completa



Acceso para rotatorios



Blanqueamiento médico, uso en gabinete dental



Adhesión indirecta de brackets de ortodoncia

Guía de Posicionamiento



PASO 1.

Simplemente presione simultáneamente las pestañas del abre bocas Umbrella, asegurándose de que las flechas indican hacia arriba, ya está preparado para su colocación



No coloque el retractor al revés



PASO 2.

Pida al paciente que coloque la punta de su lengua en el paladar de su boca



PASO 3.

Elija un lado de la boca desde donde empezar a colocar el abre bocas suavemente



PASO 4.

Usar las pestañas para centrar el abre bocas con la boca del paciente



PASO 5.

Compruebe que la lengua del paciente está descansando cómodamente detrás del protector, asegurando un fácil acceso.



No coloque el abre bocas encima de la lengua del paciente



El nuevo abrebocas Umbrella™ ha sido desarrollado para ofrecer la máxima comodidad al paciente asegurando al mismo tiempo un aislamiento efectivo del campo operatorio.

Sus beneficios van mucho más allá que una simple retracción de tejidos blandos:



- ◆ Permite mantener la boca abierta de forma natural y suave, evitando que los labios estén presionados o estirados
- ◆ Garantiza el máximo alivio, evitando posibles reflejos
- ◆ Puede mantenerse durante el control de oclusión o utilizarse junto con un bloqueo oclusal, mientras que la lengua permanece cómodamente acostada detrás del protector de lengua
- ◆ Permite abrir el espacio entre labios y mejillas, favoreciendo la acumulación de la saliva de los dientes, facilitando la succión y reduciendo así el riesgo de contaminación
- ◆ Posicionamiento rápido y sencillo
- ◆ Desechable y libre de látex

4870 - Umbrella - Abrebocas
5 Abrebocas tamaño medios

5162 - Umbrella - Abrebocas
40 Abrebocas tamaño medio

4871 - Umbrella - Abrebocas
20 Abrebocas tamaño medio