

類別:機械器具 65 歯科用充填器

一般医療機器 一般的名称:歯科用注入器具 70718000

再使用禁止

販売名:ナビチップ 31G サイドポート

**【禁忌・禁止】**


[使用方法]

- ・本品の改造や加工等を行わないこと。[改造等により、安全性が担保されず、故障、折損等の原因となるため。]
- ・再使用禁止

**【形状、構造及び原理等】**

[形状・構造]

本品には、ニードルの長さによって以下の2種類がある。

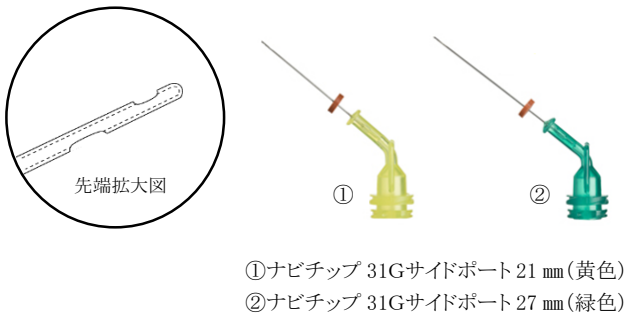

[原材料]

ポリプロピレン、ステンレススチール、シリコーンゴム

**【使用目的又は効果】**

本品は、歯科材料を口腔内又はトレーに注入するために用いる。洗浄又は消毒に用いる歯科材料を根管内に注入するのに適している。

**【使用方法等】**

[使用方法(例)]

- (1) シリンジのキャップをはずす。
- (2) シリンジの先端に本品を回しながらしっかりと取り付ける。
- (3) 口腔内に使用する前に流出性のテストをする。
- (4) 各材料の取扱説明書に従って材料を注入する。

**\*【使用上の注意】**

1. 使用注意

- (1) 使用中にチップが外れないよう、チップはしっかりとねじって取り付けること。
- (2) チップをつけた状態で、口腔内に使用する前に、材料の流れ具合を確認すること。
- (3) 材料がスムーズにチップから注出されない場合は、チップを交換すること。
- (4) 材料を注入するとき、チップ又は材料が根尖を突き抜けないように、根尖から2mm以上アンダーの位置より注入し、チップが根管壁に接触しないゆるい状態を保つこと。

2. 不具合・有害事象

- 1) 重大な不具合
  - ・ 破損、折損
  - ・ 動作不良

**【保管方法及び有効期間等】**

[保管方法]

常温保管

**\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

[製造販売業者]

ULTRADENT JAPAN 株式会社  
電話番号 0120-060-751

[製造業者]

ウルトラデント プロダクツ インク  
ULTRADENT PRODUCTS, INC.(米国)