



DR. GAETANO PAOLONE

Depuis 2014, le Dr Paolone est professeur de recherche en dentisterie restauratrice à l'Université Vita-Salute San Raffaele de Milan. Il a obtenu un doctorat en biomatériaux dentaires à l'université de Portsmouth, au Royaume-Uni. Le Dr Paolone est membre associé de l'Académie américaine de dentisterie restauratrice (AARD) et membre actif de l'Académie italienne de dentisterie conservatrice et restauratrice (AIC). Il a siégé au conseil d'administration de l'AIC en tant que secrétaire de 2018 à 2019 et au comité scientifique de 2020 à 2022. Le Dr Paolone gère un cabinet privé à Rome. En outre, il enseigne dans le cadre du programme de maîtrise en esthétique et en dentisterie restauratrice à l'université de Bologne, en Italie, et dans le cadre du diplôme universitaire (DU) en dentisterie esthétique à l'université de Montpellier, en France. Il est l'auteur de deux livres, Direct Posterior Composite Restorations et Direct Anterior Composite Restorations. Il est également l'auteur et le co-auteur de nombreux articles dans des revues scientifiques internationales et a contribué à divers ouvrages. Il donne régulièrement des cours et des conférences au niveau national et international.



1. Restaurations anciennes défectueuses.



2. Après une isolation adéquate par pose de la digue en caoutchouc, les matériaux anciens sont déposés.



3. Mordançage sélectif de l'émail avec Ultra-Etch™ pendant 30 secondes.



4. Situation clinique après la procédure de collage.



5. Transcend™ composite teinté Universal Body (UB) appliqué par couches successives de 2 mm.



6. Situation clinique avant caractérisation occlusale.



7. Notez l'amélioration de la caractérisation occlusale après l'application du pigment.



8. Restauration finale après le protocole de polissage.



“ Le composite Transcend s'adapte chromatiquement au substrat et conserve sa forme lors de sa mise en place. ”

- Dr. Gaetano Paolone