

1. 사용목적

근관 충전시 사용하는 재료

2. 사용방법

가. 사용 전의 준비 사항

- 1) 주위 환경의 상태를 면밀히 파악한 후 제품을 개봉한다. 먼지나 여타의 오염 물질이 있는 곳에서 사용하면 안 된다.
- 2) 제품의 이상 상태, 불순물 여부 등을 확인한다.

나. 사용방법 또는 조작순서

- 1) Syringe에 luer lock cap을 제거한 다음 NaviTip을 주사기에 단단히 끼워 넣는다.
- 2) 천천히 끝부분을 뒤로 빼면서 치근단을 제외한 부분에 UltraCal XS을 주입한다.

다. 사용 후 보관 및 관리방법

- 1) 유효기간이 지난 제품을 사용해서는 안 된다.
- 2) 실온 보관한다.
- 3) 사용 후 즉시 밀봉한다.

3. 사용 시 주의사항

가. 사용할 때 주의사항

- 1) 본 제품은 염기성으로 사용 시 주의를 기울이고 실수로 Paste가 원하지 않은 부위에 묻게 되면 다량의 물로 헹구어 낸다.
- 2) 팁은 일회용이며, 재사용하지 않는다.
- 3) NaviTip을 이용하여 주입하고 치근단에서 최소 2mm가 낮은 상태를 유지하며, 치관보다 가는 Tip을 사용하도록 한다. 치관을 막을 수 있는 플라스틱 Tip을 사용하여 주입하지 않는다.
- 4) Syringe에 채워져 있는 양은 여러 번에 걸쳐 사용할 수 있는 양이며, 사용할 때마다 적절한 세척 및 살균 처리를 거치도록 한다.
- 5) 교차 감염에 대한 보호벽 역할을 하는 Ultradent Impulse Sealer로 밀봉된 Ultradent Syringe Cover를 사용하는 것이 좋다.
- 6) 제품이 과도하게 충전되어 치근단공을 넘어 근관 밖으로 과도하게 누출될 경우, 누출량 및 주위 해부학적 구조물에 따라 극심한 통증, 치유 지연, 감각 이상 등이 발생할 가능성이 있으므로, 충전재가 근관 밖으로 누출되지 않도록 주의한다.

나. 유효기간

24개월

다. 보관조건 및 저장방법

실온보관

본 제품은 의료기기임

품목명: 기타 근관 충전용 재료

모델명: 제조원의 표시사항 중 모델명 REF 참조

수입품목인증번호 : 수인06-1170호

수입자의 상호 및 주소: (주)메디팁 / 서울특별시 강남구 개포로 619, 10층 (개포동, 강남우체국빌딩)

제조자: ULTRADENT PRODUCTS, INC(미국)

부작용 보고 관련 문의처: 한국의료기기안전정보원, 080-080-4183

작성연월: 2025년 2월