



EASE-IN-SHIELDS™

Lente de Proteção para Lupas

INSTRUÇÃO DE USO




DESCRIÇÃO DO PRODUTO:


A lente Ease-In-Shields™ é um protetor ocular para laser projetada para acomodar vários tamanhos e morfologias faciais, bem como os muitos formatos e tamanhos de praticamente todas as lupas e óculos. A lente Ease-In-Shields™ fornece proteção à visão, juntamente com os benefícios de colocações e remoções rápidas e higiênicas sem remover as lupas ou óculos do rosto.

Lente Ease-In-Shields™	OD @ Comprimento de onda
Dual Wave	OD 5+ @ 800-<900 nm, OD 6+ @ 900-<980 nm, OD 7+ @ >980-1064 nm, OD 6+ @ >1064-1080 nm



CONTEÚDO DA CAIXA:

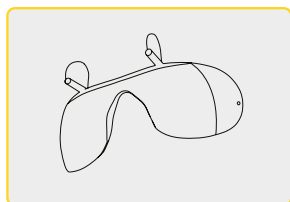

1x Lente Ease-In-Shields™

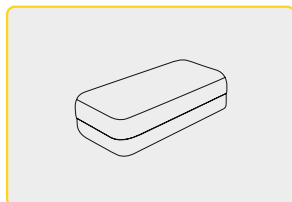

1x Estojo Protetor

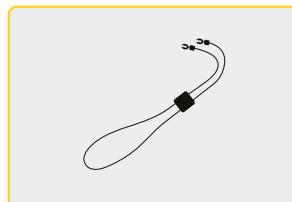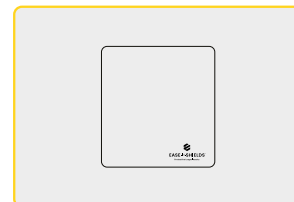
1x Cordão de Cabeça
Ajustável

1x Pano de Limpeza
de Microfibras


INDICAÇÃO DE USO:

Use a lente Ease-In-Shields™ para proteger os olhos da energia luminosa do laser prejudicial produzida durante procedimentos odontológicos e médicos.

CONTRAINDICAÇÕES:

Para pacientes ou usuários com preocupações com alergias, consulte o documento sobre alergênicos do produto disponível em ultradent.com. Se for observada reação alérgica, enxágue bem a área exposta com água e peça ao paciente para consultar seu médico.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS:

A seleção da proteção apropriada deve ser baseada tanto na densidade óptica necessária para reduzir a exposição incidente ao laser a um nível seguro, quanto na capacidade de suportar a exposição incidente ao laser sem falhas, conforme indicado pela categoria de resistência. Combinações inadequadas de densidade óptica e categoria de resistência, particularmente um alto nível de densidade óptica em combinação com uma categoria de alta resistência insuficiente, não devem ser usadas.


- A lente Ease-In-Shields™ destina-se apenas a proteger contra exposição acidental à radiação laser. NUNCA use proteção ocular a laser para olhar deliberadamente para a fonte de radiação laser. Essa visualização pode danificar o protetor e resultar em ferimentos graves. A exposição acidental à radiação laser também pode queimar a pele.
- A modificação deste produto pode afetar adversamente o desempenho do produto.
- Este produto pode afetar a percepção das cores.
- A lente Ease-In-Shields™ foi desenvolvida apenas para uso com os comprimentos de onda do laser marcados na lente.
- Todas as pessoas na sala com o laser devem usar óculos de proteção específicos para o comprimento de onda.
- Evite exposição direta, indireta ou refletida à energia do laser.
- Use a lente Ease-In-Shields™ sempre que o laser estiver sendo disparado.
- Certifique-se de que o produto se encaixa corretamente e com segurança antes do uso.
- Sempre verifique se há danos no produto antes do uso. Qualquer lente Ease-In-Shields™ rachada, furada ou arranhada deve ser substituída.
- Pare o procedimento de cura a laser e remova a lente Ease-In-Shields™ se ocorrer desconforto ocular.
- Este produto não é para proteção contra riscos mecânicos.
- Não limpe a lente Ease-In-Shields™ com panos ou líquidos abrasivos.
- Não coloque a lente Ease-In-Shields™ em lupas que não estejam sendo usadas, pois podem escorregar e serem danificadas.
- Tenha cuidado ao colocar ou remover a lente Ease-In-Shields™ do rosto.
- Para informações sobre transmissão luminosa visível (VLT), entre em contato com o Atendimento ao Cliente da Ultradent.
- Mantenha esta instrução de uso com o produto. Não descarte.
- Consulte um profissional de saúde para quaisquer perguntas relacionadas ao produto.

INSTRUÇÕES PASSO A PASSO:

USE COM LUPAS

1. Comece colocando suas lupas ou óculos assentados totalmente e adequadamente em seu rosto.
2. Com a lente Ease-In-Shields™ voltada para frente, use as “abas superiores” para abaixar suavemente a lente Ease-In-Shields™ em uma posição confortável e eficaz entre seus óculos e seu rosto.
3. Certifique-se de que a lente Ease-In-Shields™ esteja firmemente assentada nas lupas ou óculos e que os olhos estejam cobertos antes do uso.

NOTA: Se houver resistência ao colocar a lente, reajuste a lupa e o posicionamento da lente para evitar danos.

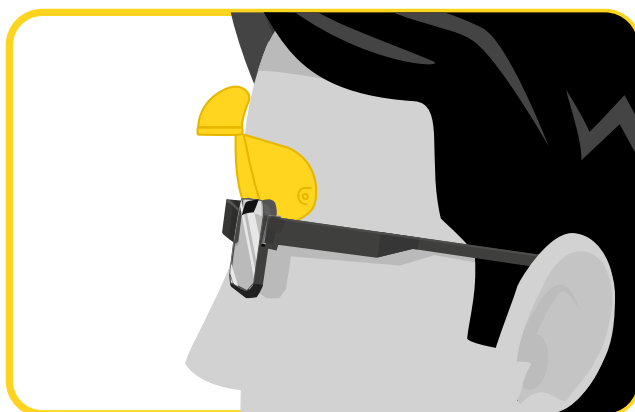

USE COM O CORDÃO DE CABEÇA AJUSTÁVEL

1. Coloque a lente Ease-In-Shields™ sobre os olhos com o cordão apoiado em ambas as orelhas.
2. Aperte o cordão conforme necessário para obter um ajuste mais firme ao redor da cabeça.
3. Certifique-se de que a lente Ease-In-Shields™ esteja firmemente no lugar e os olhos estejam cobertos antes de usar.

ARMAZENAMENTO E DESCARTE:

Para melhor proteção, armazene a lente Ease-In-Shields™ em seu estojo protetor quando não estiverem em uso. Descarte os resíduos de acordo com as regras, diretrizes e regulamentações locais.

LIMPEZA:

Se necessário, limpe com água morna e sabão, enxágue bem com água limpa e seque com um pano limpo e sem fiapos. Use técnicas de desinfecção a frio conforme necessário. NÃO use esterilização por calor ou produtos de limpeza abrasivos, pois eles podem danificar sua lente.

GARANTIA LIMITADA DE UM ANO:

A Ultradent Products, Inc. ("Ultradent") garante que este produto (não incluindo componentes acessórios como, mas não se limitando a, cordões, panos ou estojos) deverá, por um período de um ano a partir da data da compra, quando operado de acordo com as instruções de operação incluídas com o produto, (i) estar em conformidade em todos os aspectos materiais com as especificações estabelecidas na documentação da Ultradent que acompanha o produto; e (ii) estar livre de defeitos de material e fabricação.

Esta garantia limitada é intransferível e se aplica somente ao comprador original e não se estende aos proprietários subsequentes do produto. Esta garantia limitada será anulada se o produto falhar ou for danificado devido a negligência, abuso, má utilização, acidente, modificação, adulteração, alteração ou falha em seguir as instruções de uso aplicáveis. Apenas para fins de exemplo, um produto que sofre uma queda e é danificado não é coberto por esta garantia. Para se qualificar sob esta garantia limitada, o comprovante de compra (por exemplo, recibo de venda ou documentação similar) deve ser apresentado à Ultradent junto com o produto defeituoso.

Ultradent irá reparar ou substituir os produtos defeituosos, ao seu exclusivo critério, que se enquadrem nesta garantia. Sob nenhuma circunstância a Ultradent será responsável por quaisquer danos indiretos, incidentais, previstos, imprevistos, especiais ou consequentes decorrentes de ou em conexão com o uso deste produto.

REQUISITOS ESSENCIAIS DE SEGURANÇA E EFICÁCIA DE PRODUTOS DE SAÚDE:

Ease-In-Shields™ quando utilizado para o fim a que foi projetado, e quando manuseado pelo dentista seguindo as instruções de uso, não apresenta riscos ao paciente nem ao dentista.

ESPERAMOS QUE VOCÊ APROVEITE SUA NOVA LENTE EASE-IN-SHIELDS™.

RELATE QUALQUER INCIDENTE SÉRIO AO FABRICANTE E À AUTORIDADE COMPETENTE.
PARA DÚVIDAS LIGUE EM **0800 773 5100** OU VISITE NOSSO SITE EM **WWW.ULTRADENT.COM.BR**.



ANVISA nº: 80279910108

Detentor do registro e Distribuidor:

Ultradent do Brasil Produtos Odontológicos Ltda.
Alameda Ezequiel Mantoanelli, 2121
Itaici - Indaiatuba/SP
CEP: 13340-350
CNPJ: 06.295.846/0001-82

Fabricado por:

Ultradent Products, Inc.
505 West Ultradent Drive (10200 South),
South Jordan UT, 84095, USA 1012108

Responsável Técnico: Claudia Cavani Kurozawa

CRQ/SP nº: 04261572

