

1. 사용목적

치아의 과민 반응을 치료하기 위해 사용

2. 사용방법

가. 사용 전 준비사항

- 1) 주위 환경의 상태를 면밀히 파악한 후 제품을 개봉한다. 먼지나 여타의 오염 물질이 있는 곳에 사용하면 안 된다.
- 2) 제품의 이상 상태, 불순물 여부 등을 확인한다.
- 3) 1.2ml의 충전된 시린지를 사용할 경우
 - ① 시린지의 luer lock cap을 제거한다.
 - ② 일회용 팁을 시린지에 끼워 넣는다(Black Mini Brush팁이나 Blue Mini Dento-Infusor팁을 사용한다).
 - ③ 최적의 조건을 유지하기 위해 시린지를 손가락으로 잡기 보다는 손바닥을 이용하여 잡는다.

나. 사용방법 또는 조작순서

- 1) 본 제품을 사용하기 이전에 직접 적용 또는 레진 봉니 수복을 적용할 표면에 접착하기 위하여 에칭한다. 적은 양을 Black Mini Brush tip을 이용해 바르고 공기 중에서 말린다. 물로 헹구지 않는다.
- 2) 젖은 상아질 표면을 얻기 위해 과도한 액체를 제거한다.
- 3) 지시사항에 따라 적당한 접착기술과 함께 계속한다.
- 4) 혼합 아말감 준비를 위해 임시 치관 접합과 같은 표면을 처리한다. 필요하면 적당한 상아질 이장재를 넣는다.
- 5) 레진 봉니, 아말감, 유리 ionomer을 취해 PQ1 또는 PermaQuick과 같은 접착제로 접착하고 에칭한 후 나 그 전에 소독한다.
- 6) 치수(pulp)에 가까이 소독하기 위해, 60초 동안 부드럽게 본 제품을 문지른다. 헹구지 말고 천천히 공기 중에 건조시킨다. Ultra-Blend plus, Ultra-Etch 35% 인산과 상아질 봉합을 위한 접착제의 적용에 따른다. 모든 재료들을 위의 적당한 절차에 따라 사용한다.

다. 사용 후 보관 및 관리방법

- 1) 유효기간이 지난 제품을 사용해서는 안 된다.
- 2) 실온 보관한다.
- 3) 사용 후 즉시 밀봉한다.

3. 사용 시 주의사항

가. 사용할 때 주의사항

- 1) 팁은 일회용이며, 재사용하지 않는다.
- 2) 제품을 섭취해서는 안 된다.
- 3) Chlorhexidine에 민감한 환자에게는 사용하지 않는다.
- 4) 교차오염을 방지하기 위한 보호장벽에는 Ultradent Impulse Sealer로 봉니된 Ultradent Syringe Cover의 사용이 권장된다.

나. 유효기간: 48개월

다. 보관조건 및 저장방법: 실온보관

본 제품은 의료기기임

품목명 : 지각 과민 처치제

모델명 : 제조원의 표시사항 중 모델명 REF 참조

수입품목인증번호 : 수인05-1052호

수입자의 상호 및 주소 : (주)메디팁 / 서울특별시 강남구 개포로 619, 10층 (개포동, 강남우체국빌딩)

제조자 : ULTRADENT PRODUCTS, INC(미국)

부작용 보고 관련 문의처 : 한국의료기기안전정보원, 080-080-4183

작성연월: 2025년 2월