

TISSUE MANAGEMENT

Procédures




Nos produits pour le Tissue Management ont été conçus pour venir se compléter dans une même procédure. Les praticiens peuvent personnaliser le traitement, selon les cas.

La décision finale dépend naturellement de la préférence du praticien, mais voici nos recommandations pour utiliser au mieux notre gamme de produits de gestions de tissus.

TISSUE MANAGEMENT

Procédures

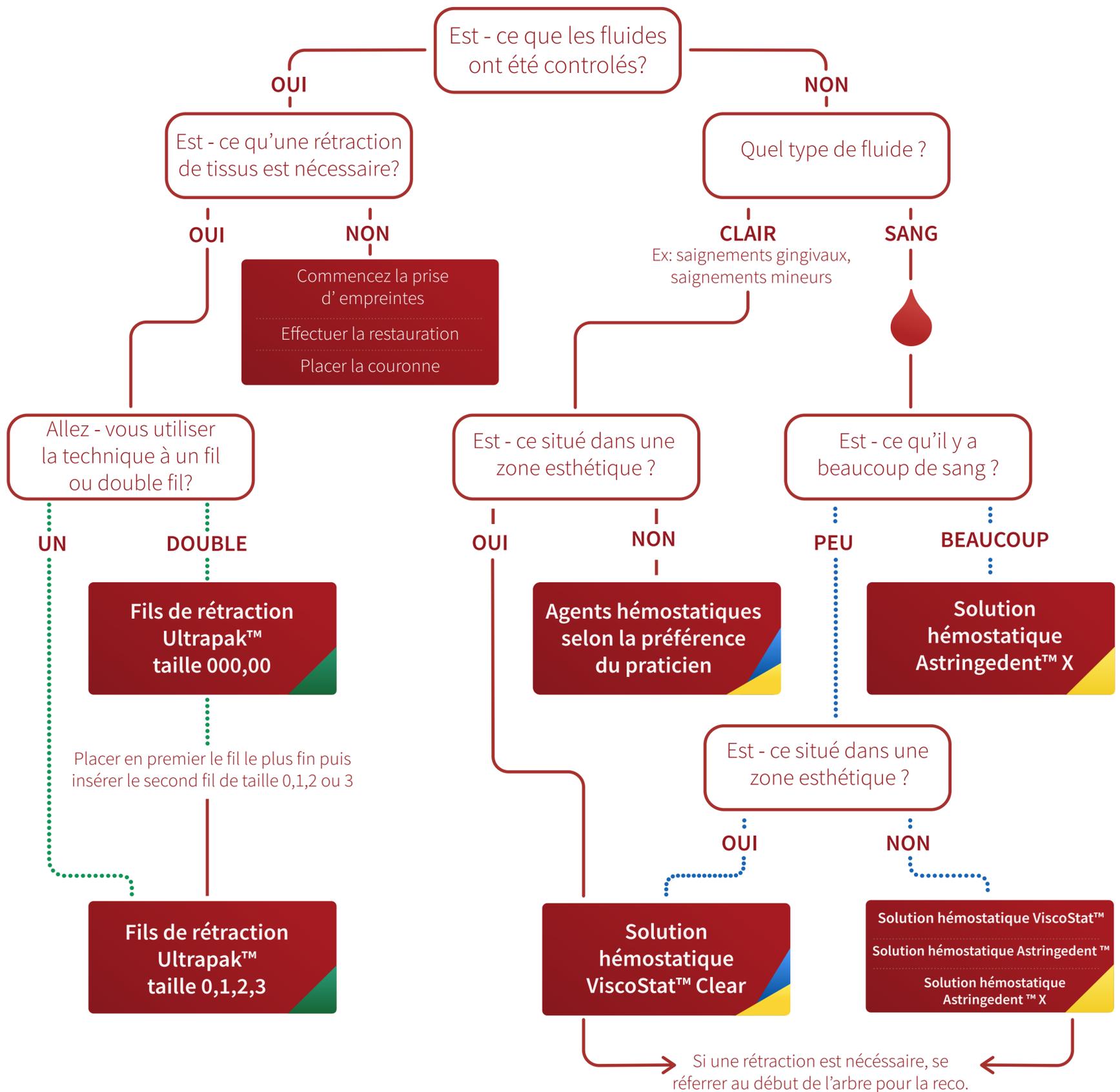

BON A SAVOIR

..... Technique de polissage

Frotter fermement les agents hémostatiques contre le sulcus. Une pression ferme est indispensable pour que les agents hémostatiques soient efficaces.

..... Imbiber le fil de rétraction

Plonger le premier fil de rétraction dans la solution hémostatique.

▲ Packers insert-fils Ultrapak™ du Dr. Fischer

Ces insert - fils facilitent l'insertion du fil de rétraction tricoté Ultrapak™. Leurs bords minces et leurs stries fines pénètrent dans le fil de rétraction et l'empêchent de glisser, réduisant ainsi le risque de lésion de l'attache épithéliale.

▲ Embout Blue Mini™

Conçu pour appliquer les solutions hémostatiques dans un tissu cicatrisant ou sensible. Si seul le contrôle du fluide sulculaire est requis, utiliser l'embout Dento- Infuso, qui a une extrémité plus douce.

▲ Embout Dento - Infusor™ Tip

Conçu pour appliquer les solutions hémostatiques dans un tissu incisé, et éliminer les caillots superficiels. Canule émoussée et coudée avec pinceau ouaté pour application d'une pression légère sur le sulcus.