

【禁忌・禁止】


【使用方法】

- ・本品の改造や加工等を行わないこと。(改造等により、安全性が担保されず、故障、折損等の原因となるため)
- ・再使用禁止

【形状、構造及び原理等】

【形状・構造】

チップアダプター

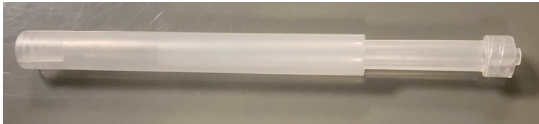

【原材料】 ポリプロピレン、ポリエチレン

【使用目的又は効果】

本品は、非能動型の吸引装置(通常、歯科専用装置)に連結して用いる管状の歯科用器具で、口腔内に貯留する水分や切削片を除去するために用いる。本品は単回使用である。

【使用方法等】

使用方法(例)

1. チップアダプター部分に適切なチップをしっかりとねじ込む。
2. 接続する器具類と吸引アダプターの径をあわせ、しっかり接続して吸引を行う。

【使用上の注意】

1. 使用注意

- (1)チップをつけた状態で、口腔内に使用する前に、必ずエアの流れを確認すること。
- (2)接続する器具類、チップ類の内径により、使用できない場合があるので注意すること。

2. 不具合・有害事象

本品の使用によって起こる不具合・有害事象は以下のとおりである。

(1) 重大な不具合

- ・破損、折損
- ・動作不良

【保管方法及び有効期間等】

常温保管

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造販売業者】

ULTRADENT JAPAN 株式会社

電話番号 0120-060-751

【製造業者】

ウルトラデント プロダクツ インク

ULTRADENT PRODUCTS, INC.(米国)