



La pluma **KwikPen**[®] paso a paso

Lilly


1 PREPARACIÓN

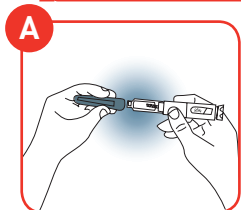

Asegúrese de que es la insulina que le ha prescrito su médico

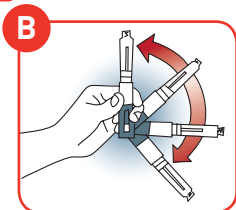


Si está turbia, mueva la pluma suavemente hasta conseguir un aspecto uniforme

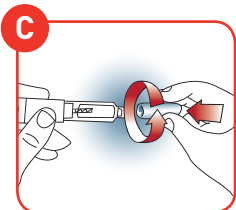


Enrosque la aguja nueva


2 PURGADO

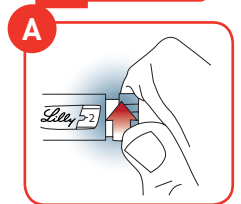

Gire el botón de dosificación hasta que aparezca el 2

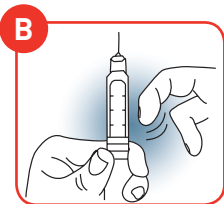


Golpee suavemente con el dedo el cartucho

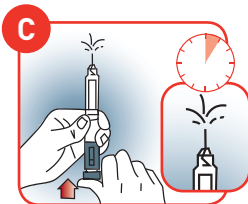


Apriete hasta el fondo el botón de inyección durante 5 seg. Aparecerán unas gotitas o un pequeño chorro de insulina por la aguja


3 INYECCIÓN

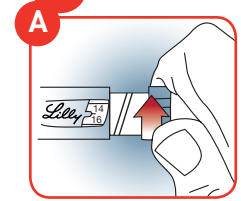


Gire el botón de dosificación hasta que aparezca la dosis a inyectarse

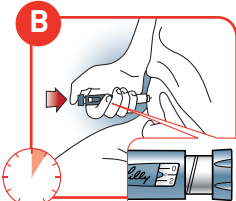

Inyecte la aguja y apriete el botón de dosificación firmemente. Cuente lentamente hasta 5 antes de retirar la aguja

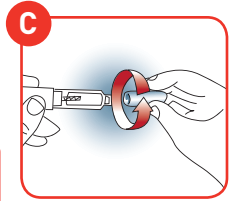

Tape la aguja y deséchela

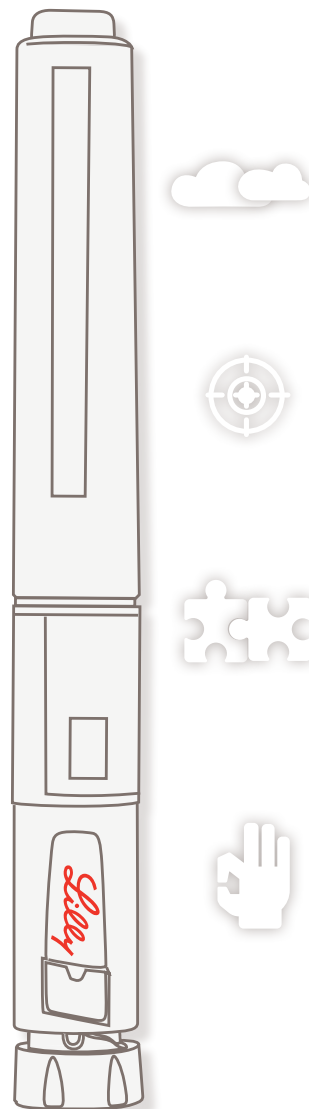


PP-HI-ES-0199

Siga las indicaciones del manual de usuario

SI SU PLUMA DE INSULINA NO FUNCIONA CORRECTAMENTE:

COMPRUEBE LA AGUJA Y ASEGÚRESE DE QUE

NO está aplastada

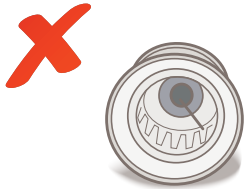


NO está torcida



NO se ha partido




Aguja en buen estado

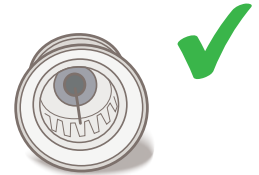

La insulina sale correctamente

KwikPen®



ASEGÚRESE DE ENROSCAR CORRECTAMENTE UNA AGUJA NUEVA

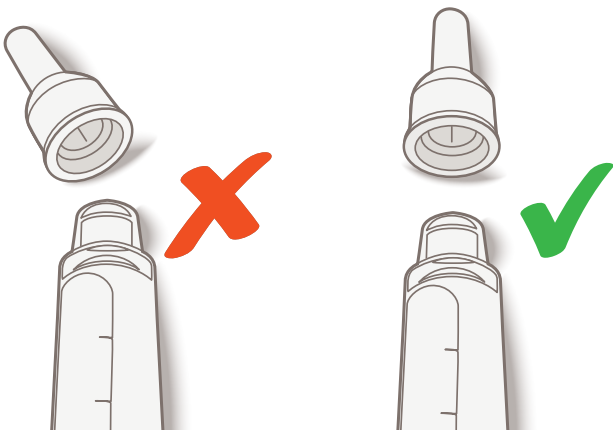

Siempre en línea recta

DESPUÉS DE CADA APLICACIÓN
Retire la aguja para
evitar fugas de insulina
o **entrada de aire** al cartucho

COMPRUEBE QUE LA PLUMA NO ESTÁ SUCIA

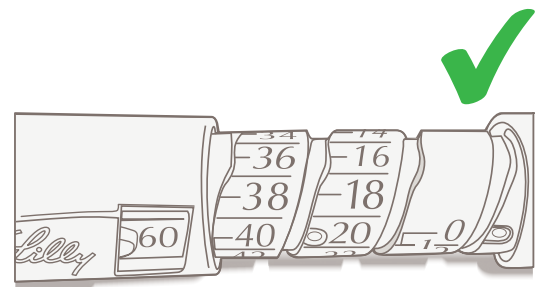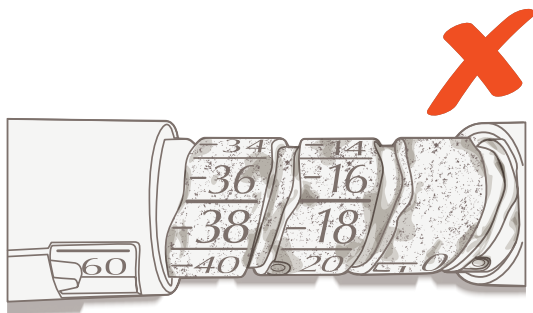

GUARDE SU PLUMA PROTEGIDA de la suciedad y polvo ambiental
para **asegurar** una **presión suave del botón de dosificación**