



La pluma Junior KwikPen® paso a paso

Lilly


1 PREPARACIÓN

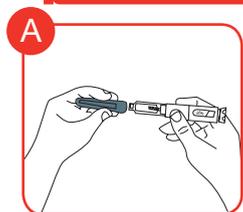

Asegúrese de que es la insulina que le ha prescrito su médico

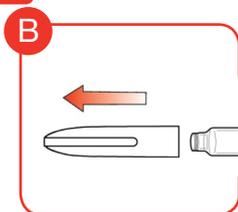


Tire del capuchón de la pluma. Humalog se debe ver transparente e incoloro

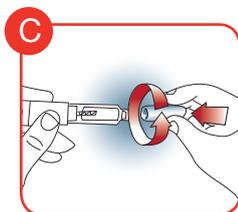


Enrosque la aguja nueva


2 PURGADO

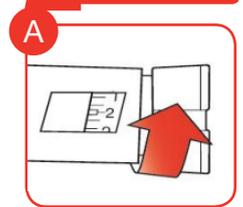


Gire el botón de dosificación hasta que aparezca el 2

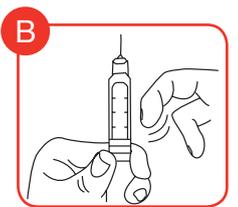

Golpee suavemente con el dedo el cartucho

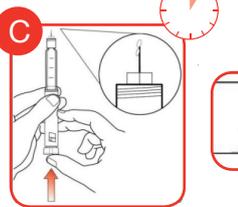


Apriete hasta el fondo el botón de inyección durante 5 seg. Aparecerán unas gotitas o un pequeño chorro de insulina por la aguja

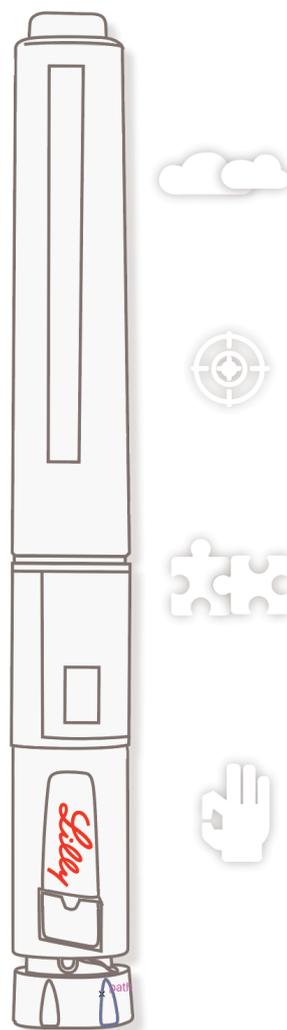


ANTES DE USAR LA PLUMA Junior KwikPen®

debe leer cuidadosamente el manual de usuario que acompaña al prospecto


3 INYECCIÓN

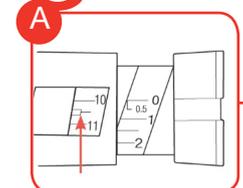

Gire el Botón de Dosificación para seleccionar el número de unidades que necesite inyectarse (puede administrar desde media unidad (0,5 unidades) a 30 unidades en cada inyección)
Las medias unidades se muestran como líneas entre los números. Puede corregir la dosis girando el Botón de Dosificación en cualquier dirección hasta que la dosis correcta se alinee con el indicador de dosis

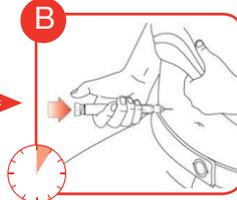

Inyecte la aguja y apriete el botón de dosificación firmemente. Cuente lentamente hasta 5 antes de retirar la aguja

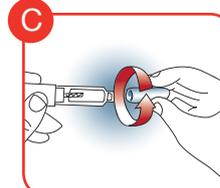

Tape la aguja y deséchela

Siga las indicaciones del manual de usuario

SI SU PLUMA DE INSULINA NO FUNCIONA CORRECTAMENTE:

COMPRUEBE LA AGUJA Y ASEGÚRESE DE QUE

NO está aplastada



NO está torcida



NO se ha partido




Aguja en buen estado



La insulina sale correctamente

KwikPen®


ASEGÚRESE DE ENROSCAR CORRECTAMENTE UNA AGUJA NUEVA

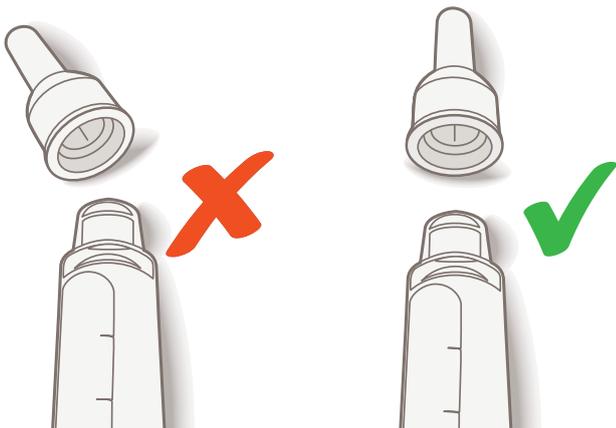

Siempre en línea recta

DESPUÉS DE CADA APLICACIÓN
Retire la aguja para
evitar fugas de insulina
o entrada de aire al cartucho

COMPRUEBE QUE LA PLUMA NO ESTÁ SUCIA

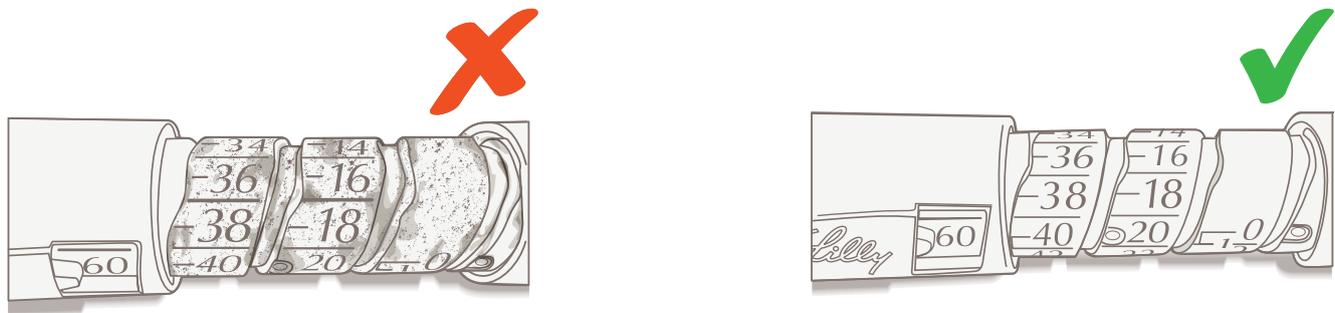

GUARDE SU PLUMA PROTEGIDA de la suciedad y polvo ambiental
para asegurar una presión suave del botón de dosificación