


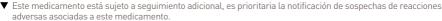



Material informativo de uso del dispositivo. Consulta a tu profesional sanitario ante cualquier duda respecto al contenido.



Referencia: Ficha técnica de Mounjaro® KwikPen® (tirzepatida). Disponible en: https://www.ema.europa.eu/es/documents/product-information/mounjaro-epar-product-information es.pdf. Último acceso en enero 2025.

## ¿Qué es Mounjaro® KwikPen® (tirzepatida) y para qué se utiliza?

Mounjaro® KwikPen® (tirzepatida) contiene un principio activo llamado tirzepatida y se utiliza para tratar a adultos con diabetes mellitus tipo 2 y para tratar a adultos con obesidad o sobrepeso (con un IMC de al menos 27 kg/m²) y problemas de salud relacionados con el peso.

## Mounjaro® KwikPen® (tirzepatida) se presenta en una pluma precargada llamada KwikPen®

 Cada pluma KwikPen® contiene 2,4 ml de solución inyectable (4 dosis de 0,6 ml) y exceso para el purgado, para 4 semanas de tratamiento.




## ¿Cómo se utiliza Mounjaro® KwikPen® (tirzepatida)?

- Mounjaro® KwikPen® (tirzepatida) se inyecta debajo de la piel (inyección subcutánea).
- Debes administrarte el medicamento el mismo día de cada semana.
- Puedes hacerlo a cualquier hora del día, con o sin alimentos.
- Sigue las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por tu equipo médico.

## Algunos consejos que puedes seguir:

- Para ayudarte a recordar cuándo usar Mounjaro® KwikPen® (tirzepatida), puedes anotarlo en tu calendario.
- Si es necesario, puedes cambiar el día de tu inyección semanal de Mounjaro® KwikPen® (tirzepatida), siempre que hayan pasado al menos 3 días desde tu última inyección. Después de seleccionar un nuevo día de dosificación, continúa con la administración una vez a la semana en ese nuevo día.
- Puedes administrarte Mounjaro® KwikPen®
  (tirzepatida) en la zona del estómago (abdomen)
  a una distancia mínima de 5 cm del ombligo,
  o en la parte superior de la pierna (muslo),
  o en la parte superior del brazo.
- Es posible que necesites ayuda de otra persona para inyectarte en la parte superior del brazo.
- Si quieres, puedes inyectarte en la misma zona del cuerpo cada semana. En este caso, asegúrate de elegir dentro de la misma zona, diferentes sitios de inyección.
- Si también te inyectas insulina, elije un sitio de inyección diferente para esa administración.

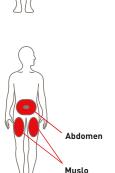

Parte superior


del brazo

IMC: Índice de masa corporal.

Referencia: Prospecto de Mounjaro® KwikPen® (tirzepatida). Disponible en: https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2024/20240419162204/anx\_162204\_es.pdf. Último acceso en enero 2025. Material informativo de uso de dispositivo. Consulta a tu profesional sanitario ante cualquier duda respecto al contenido.

Referencias: Prospecto de Mounjaro® KwikPen® (tirzepatida). Disponible en: https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2024/20240419162204/anx\_162204\_es.pdf. Último acceso en enero 2025. Material informativo de uso de dispositivo. Consulta a tu profesional sanitario ante cualquier duda respecto al contenido.

# Partes de la pluma de administración subcutánea

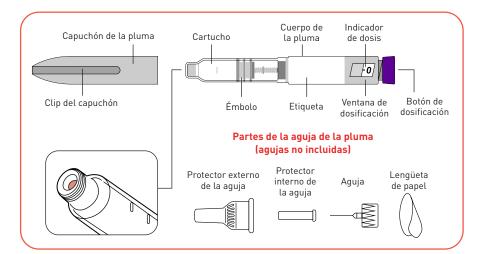

#### Materiales necesarios para la inyección:



Pluma precargada: Mounjaro® KwikPen® (tirzepatida).



Aguja compatible con KwikPen® (Si no sabes qué aguja para pluma utilizar, habla con tu profesional sanitario).




Algodón.



Contenedor para objetos punzantes o un contenedor de plástico duro provisto de un cierre de seguridad.

# ¿Cómo se inyecta la pluma de Mounjaro «KwikPen « (tirzepatida)?

#### Paso 1: Prepara tu pluma

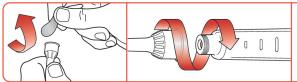

Selecciona una nueva aguja para la pluma. Utiliza siempre una nueva aguja para cada invección. Empuja directamente la aguja tapada en línea recta sobre la pluma y gírala hasta que guede apretada.



Protector interno de la aguja


Retira el protector externo de la aguja. No lo tires. Retira el protector interno y deséchalo.

#### Paso 2: Purga tu pluma. Debes purgar tu

#### Debes purgar tu pluma antes de cada inyección



Para purgar tu pluma gira el botón de dosificación hasta que oigas 2 clics y se muestre la línea alargada ( ) en la ventana de dosificación.

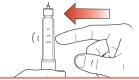

Sujeta la pluma con la aguja apuntando hacia arriba. Golpea el soporte del cartucho suavemente para llevar las burbujas de aire hacia arriba.




Empuja el botón de dosificación hasta que llegue al tope y aparezca "O" en la ventana de dosificación, luego mantén presionado el botón de dosificación y cuenta despacio hasta 5.

#### Paso 3: Inyección de la dosis



Gira el botón de dosificación hasta que se detenga y se muestre el icono de <u>f1</u> en la ventana de dosificación.

El icono de 17 equivale a una dosis completa.

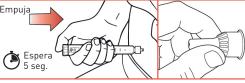

Inyecta el medicamento empujando el botón de dosificación hacia dentro hasta que se detenga y, a continuación, cuenta lentamente hasta 5 mientras mantienes pulsado el botón de dosificación. El icono de 0 debe aparecer en la ventana de dosificación antes de retirar la aquia.

Vuelve a colocar con cuidado el protector externo de la aguja. Desenrosca la aguja tapada y deposítala en un contenedor para objetos punzantes.

Referencias: Instrucciones de Mounjaro® KwikPen® (tirzepatida). Disponible en: https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2024/20240419162204/anx\_162204\_es.pdf. Último acceso en enero 2025. Material informativo de uso de dispositivo. Consulta a tu profesional sanitario ante cualquier duda respecto al contenido.

Referencias: Instrucciones de Mounjaro® KwikPen® (tirzepatida). Disponible en: https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2024/20240419162204/anx\_162204\_es.pdf. Último acceso en enero 2025. Material informativo de uso de dispositivo. Consulta a tu profesional sanitario ante cualquier duda respecto al contenido.

# Conservación de las plumas de Mounjaro<sup>®</sup> KwikPen<sup>®</sup> (tirzepatida):

#### Plumas sin usar:



Consérvalas en la nevera, entre 2 °C y 8 °C.



Las plumas sin usar se pueden utilizar hasta la fecha de caducidad impresa en la etiqueta si se han conservado en el frigorífico.



NO congeles la pluma. Deséchala si se ha congelado.

#### Plumas usadas:



Puedes guardar tu pluma usada a temperatura ambiente por debajo de 30 °C después de la inyección.



Mantén la pluma y las agujas fuera de la vista y del alcance de los niños.



Desecha la pluma 30 días después de su primer uso, ya que una vez pasado ese tiempo, es posible que el medicamento no funcione de forma efectiva.



Desecha la pluma después de recibir 4 dosis semanales. Es normal que quede líquido en la pluma tras administrar las cuatro dosis con sus purgados correspondientes.



Referencias: Información elaborada a partir de datos de Ficha Técnica de Mounjaro® KwikPen® (tirzepatida) https://www.ema.europa.eu/es/documents/product-information/mounjaro-epar-product-information\_es.pdf y prospecto de Mounjaro® KwikPen® (tirzepatida) https://cima.aemps.es/cima/dochtml/p/1221685051/P\_1221685051.html. Último acceso en enero 2025.

Material informativo de uso de dispositivo. Consulta a tu profesional sanitario ante cualquier duda respecto al contenido.

### Información adicional:

- No utilices este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en su etiqueta y en el embalaje.
- Conservar en el envase original para protegerlo de la luz.
- No utilices este medicamento si observas que la pluma está deteriorada o el medicamento está turbio, tiene color o contiene partículas.



Referencias: Prospecto de Mounjaro® KwikPen® (tirzepatida). Disponible en: https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2024/20240419162204/anx\_162204\_es.pdf. Último acceso en enero 2025. Material informativo de uso de dispositivo. Consulta a tu profesional sanitario ante cualquier duda respecto al contenido.



# Ahora ya estás listo para iniciar tu tratamiento con Mounjaro KwikPen® (tirzepatida)



#### Dónde puedes encontrar más información:





Escanea este código QR para acceder a un vídeo con las instrucciones de uso de Mounjaro® KwikPen® (tirzepatida).

Consulta a tu equipo médico.

Recuerda leer el prospecto y seguir las instrucciones de uso de este medicamento.



Lilly**Plus**<sup>™</sup>

**Referencia:** Ficha técnica de Mounjaro® KwikPen® (tirzepatida). Disponible en: https://www.ema.europa.eu/es/documents/product-information/mounjaro-epar-product-information\_es.pdf. Ultimo acceso en enero 2025.

Material informativo de uso de dispositivo. Consulta a tu profesional sanitario ante cualquier duda respecto al contenido.