

Käyttöohje ja tekniset tiedot



1. Valmistajan tiedot

Desingmask Oy
Kaisaniemenkatu 1 B
00100, Helsinki, Finland
Y-tunnus: 2873101-6

1. Merkki ja malli

Nimi: Desingmask 2.0

Nimike: DM 2.0

Tyyppi: Suu- ja nenäsuojus (kasvomaski)

EN-14683:2019, Type 1 mukaiset suodatustehokkuusvaatimukset täyttävä (VTT:n testaama, raportti: VTT-CR-0485-20).

2. Materiaali

Suojaimessa on neljä (4) kerrosta:

- Yläkerros
- Kaksi välikerrosta
- Alakerros

Yläkerros: Polyesterikuitukangas (Valm. Ahlström-Munksjö Tampere)

Välikerros (suodattava): Polyesteri/mikrolasikuitukangas (Valm. Ahlström-Munksjö Tampere)

Alakerros: Polyesterikuitukangas (Valm. Ahlström-Munksjö Tampere)

3. Käyttöohje

1. Pese kädet ennen käytön aloittamista
2. Aseta suojain tiiviisti naamalle nenävahvike ylöspäin, niin että suu ja nenä peittyvät
3. Suositeltava käyttöaika on neljä (4) tuntia
4. Hävitä maski käytön jälkeen

Suosittelavaa käyttöaika ei tule ylittää, vaan suojus tulee vaihtaa uuteen. Käyttäjän tulee huolehtia, että kyseistä ohjetta noudatetaan turvallisuuden varmistamiseksi.

